

Silla para actividades Rifton

R820, R830, R840, R850, R860 y R870

Manual del producto



Base estándar



Base Hi/lo (altura regulable)



Índice

Información importante	4
Mensajes de seguridad	5
Recomendaciones de uso	6
Cuadro de medidas del usuario y dimensiones del artículo	6-8
Revise su pedido	9
Componentes básicos	
Respaldo y almohadillas	9
Cinturón de seguridad	10
Reposabrazos	11-12
Profundidad de asiento	13
Inclinación	13
Opciones de resorte	14-16
Asiento de conexión rápida	17-18
Base estándar	
Patas regulables	19
Altura del asiento	19
Reposapiés	19
Base Hi/lo	
Altura del asiento	20
Frenos de ruedas y bloqueo de dirección	21
Reposapiés	22

Índice (cont.)

Accesorios

Reposacabezas	23
Adaptador Whitmyer	24
Soportes laterales	25
Correa torácica	26
Arnés mariposa	27
Cinturón de muslo	28
Arnés pélvico	29
Guías de cadera	30
Abductor	31
Aductores	31
Apoyos para piernas y correas de tobillo	32
Sandalias y cuñas	33
Kit de soporte lumbar y de asiento	34
Almohadilla de relleno del respaldo	34
Mesa	35
Apoyo de manos para mesa	35
Manillares de empuje	36
Elevador del reposapiés	36
Minikit	37
Mantenimiento, limpieza y garantía	38
Materiales y modificaciones del usuario	39

IMPORTANTE

Guarde esta manual del producto para futuras consultas. Hay copias adicionales disponibles en <http://www.rifton.com/customer-service/product-manuals>.

Claves para los usuarios

Use esta clave para determinar qué secciones de este manual del producto son importantes para usted.



Usuarios técnicos Para profesionales que piden y montan productos Rifton.



Usuarios domésticos Para cuidadores que usan productos Rifton regularmente.



Personal de mantenimiento Para cualquier persona responsable del mantenimiento o de pedidos repetidos de productos y piezas Rifton.

ADVERTENCIA



- Lea atentamente y comprenda la información de esta manual del producto antes de intentar utilizar el producto. La falta de seguimiento de los procedimientos y las instrucciones de este manual del producto puede causar lesiones graves o la muerte.
- Un profesional cualificado debe evaluar la idoneidad y seguridad de todo el equipo para cada usuario.
- Este producto está previsto para usuarios de juicio inestable, por lo que en todo momento se requiere la supervisión de un adulto.
- Para evitar caídas y lesiones:
 - No use este producto sobre superficies rugosas y desiguales, ni en las proximidades de piscinas o escaleras.
 - Compruebe que las correas y los soportes estén bien sujetos en todo momento. Las correas y los soportes se suministran para la seguridad del usuario y deben ajustarse cuidadosamente para lograr la mayor comodidad y seguridad.
 - Apriete bien todos los mandos de ajuste antes de usar el producto e inmediatamente después de realizar cualquier ajuste.
- Para evitar pellizcos o aplastamientos:
 - Mantenga a los usuarios fuera del espacio bajo el asiento de la silla.
 - Mantenga las manos por encima del asiento cuando se esté usando la opción de resorte.
- Para prevenir caídas, asfixia, atrapamiento de la cabeza u otras lesiones, utilice siempre el cinturón de seguridad o el arnés pélvico cuando tenga puestas la mesa, las correas torácicas, el cinturón de muslo, el minisoporte de tronco o el arnés mariposa.
- No use este producto para usuarios que no cumplan los límites de talla y peso especificados en este manual.
- No use este producto como silla de transporte dentro de vehículos.
- Para prevenir fallos estructurales que pueden provocar lesiones graves o muerte:
 - Compruebe de forma periódica en este producto y sus accesorios el aflojamiento o la ausencia de tornillos, la fatiga del metal, grietas, soldaduras rotas, piezas que faltan, la inestabilidad general u otros signos de desgaste excesivo.
 - Retire inmediatamente este producto si observa cualquier condición que pudiera causar un funcionamiento inseguro.
 - No use los componentes o productos Rifton para ningún otro fin distinto al previsto.

Recomendaciones de uso

La silla para actividades Rifton es un producto sanitario de clase 1. Su finalidad es ofrecer un asiento cómodo con soportes regulables para personas con discapacidades en el aula o en casa. La silla se puede agrandar, la pueden utilizar muchos usuarios y permite la adaptación de diversos accesorios que son fácilmente desmontables a medida que el usuario va ganando independencia.

Medidas para usuarios de estatura baja y dimensiones del artículo

Medidas del usuario - pulgadas (cm)	Base estándar R820	Base Hi/lo R830
Altura	32-48 (81-122)	32-48 (81-122)
con minikit	28-38 (71-97)	28-38 (71-97)
 Medida clave del usuario: estatura Seleccione la silla adecuada según la estatura total del usuario. Elija un modelo que se pueda agrandar. Importante: Asegúrese de que el ancho, la profundidad y la altura de la silla se adapten a cada usuario y que el peso del usuario no sobrepase el peso máximo recomendado.		

Dimensiones del artículo - pulgadas (cm)	Base estándar pequeña R820	Base Hi/lo pequeña R830
Ancho del chasis	patas cortas: 21 (53)	26 (66)
	patas largas: 23 (58)	
	patas cortas con ruedas giratorias: 22½ (57)	
	patas largas con ruedas giratorias: 23½ (60)	
Altura del asiento desde el suelo	patas cortas: 9½-12½ (24-32)	10-25 (25-64)
	patas largas: 18½-21½ (47-55)	
	patas cortas con ruedas giratorias: 13½-16½ (34-42)	
	patas largas con ruedas giratorias: 18½-21½ (47-55)	
Ángulo del asiento (inclinación) - grados	15° hacia delante,	15° hacia delante,
	15° hacia atrás	25° hacia atrás
Ángulo del respaldo - grados	5° hacia delante,	5° hacia delante,
	20° hacia atrás	20° hacia atrás
Altura del asiento desde el reposapiés con minikit	9-12 (23-30)	9-12 (23-30)
	6-9 (15-23)	6-9 (15-23)
Ancho del asiento con guías de cadera (sin guías de cadera)	7-9 (18-23)	7-9 (18-23)
	12 (30)	12 (30)
Profundidad de asiento con minikit	8-12 (20-30)	8-12 (20-30)
	7-11 (18-28)	7-11 (18-28)
Altura del reposabrazos desde el asiento	5-7½ (13-19)	5-7½ (13-19)
Ancho del soporte de tronco	5½-11½ (14-29)	5½-11½ (14-29)
Altura del respaldo	12½-15½ (32-39)	12½-15½
Altura del reposacabezas desde el asiento	14½-21 (37-53)	14½-21 (37-53)
Carga máxima de trabajo - libras (kg)	75 (34)	75 (34)

Medidas para usuarios de estatura media y dimensiones del artículo

Medidas del usuario - pulgadas (cm)	Base estándar R840	Base Hi/lo R850
Altura	40-56 (102-142)	40-56 (102-142)
 Medidas clave del usuario: estatura Seleccione la silla adecuada según la estatura total del usuario. Elija un modelo que se pueda agrandar.	Importante: Asegúrese de que el ancho, la profundidad y la altura de la silla se adapten a cada usuario y que el peso del usuario no sobrepase el peso máximo recomendado.	

Dimensiones del artículo - pulgadas (cm)	Base estándar mediana R840	Base Hi/lo mediana R850
Ancho del chasis	patas cortas: 23¼ (59) patas largas: 24½ (62)	27½ (70)
	patas cortas con ruedas giratorias: 24½ (62) patas largas con ruedas giratorias: 25½ (65)	
Altura del asiento desde el suelo	patas cortas: 12½-16½ (32-42) patas largas: 19-23 (48-58)	12-23 (30-58)
	patas cortas con ruedas giratorias: 16-20 (41-51) patas largas con ruedas giratorias: 19-23 (48-58)	
Ángulo del asiento (inclinación) - grados	15° hacia delante, 15° hacia atrás	15° hacia delante, 25° hacia atrás
Ángulo del respaldo - grados	5° hacia delante, 20° hacia atrás	5° hacia delante, 20° hacia atrás
Altura del asiento desde el reposapiés con elevador de reposapiés	12-16½ (30-41) 8-12½	12-16½ (30-41) 8-12½
Ancho del asiento con guías de cadera sin guías de cadera	8½-11½ (22-29) 14 (36)	8½-11½ (22-29) 14 (36)
Profundidad de asiento	11-16 (28-41)	11-16 (28-41)
Altura del reposabrazos desde el asiento	7-10½ (18-27)	7-10½ (18-27)
Distancia entre los laterales	6½-12 (17-30)	6½-12 (17-30)
Altura del respaldo	15½-19 (39-48)	15½-19 (39-48)
Altura del reposacabezas desde el asiento	17½-24½ (44-62)	17½-24½ (44-62)
Carga máxima de trabajo - libras (kg)	150 (68)	150 (68)

Medidas para usuarios de estatura alta y dimensiones del artículo

Medidas del usuario - pulgadas (cm)	Base estándar R860	Base Hi/lo R870
Altura	50-74 (127-188)	50-74 (127-188)
	Medidas clave del usuario: estatura Seleccione la silla adecuada según la estatura total del usuario. Elija un modelo que se pueda agrandar.	
	Importante: Asegúrese de que el ancho, la profundidad y la altura de la silla se adapten a cada usuario y que el peso del usuario no sobrepase el peso máximo recomendado.	

Dimensiones del artículo - pulgadas (cm)	Base estándar grande R860	Base Hi/lo grande R870
Ancho del chasis	patas cortas: 26¾ (68)	29¾ (75)
	patas largas: 26¾ (68)	
	patas cortas con ruedas giratorias: 27¾ (71)	
	patas largas con ruedas giratorias: 27¾ (71)	
Altura del asiento desde el suelo	patas cortas: 16½-20½ (42-52)	16-24 (41-61)
	patas largas: 20-24 (51-61)	
	patas cortas conruedas giratorias: 16½-20½ (42-52)	
	patas largas con ruedas giratorias: 20-24 (51-61)	
Ángulo del asiento (inclinación) - grados	15° hacia delante, 15° hacia atrás	15° hacia delante, 25° hacia atrás
Ángulo del respaldo - grados	5° hacia delante, 20° hacia atrás	5° hacia delante, 20° hacia atrás .
Altura del asiento desde el reposapiés con elevador de reposapiés	15-20 (38-51)	15-20 (38-51)
	11-16	11-16
Ancho del asiento con guías de cadera sin guías de cadera	11-14 (28-36)	11-14 (28-36)
	17 (43)	17 (43)
Profundidad de asiento	15-20 (38-51)	15-20 (38-51)
Altura del reposabrazos desde el asiento	7-10½ (18-27)	7-10½ (18-27)
Distancia entre los laterales	9½-14 (24-36)	9½-14 (24-36)
Altura del respaldo	19-24 (48-61)	19-24 (48-61)
Altura del reposacabezas desde el asiento	19½-29½ (50-75)	19½-29½ (50-75)
Carga máxima de trabajo - libras (kg)	250 (113)	250 (113)

Revise su pedido

Su silla Rifton se ha enviado conforme a sus especificaciones. Requiere cierto montaje sin herramientas. Siga estas instrucciones para asegurarse de que su silla se monta y utiliza correctamente. Este manual del producto es integral y puede tratar características que no pertenezcan a su silla.

Si su envío está incompleto o dañado de alguna manera a la llegada, llame al servicio de atención al cliente, 800.571.8198.

Artículo básico

Detrás de la almohadilla del respaldo hay una *Guía de referencia rápida* de su silla.

Consejo: Todas las palancas y los botones blancos indican un punto de ajuste.

Respaldo

El ángulo y la altura del respaldo se ajustan con palancas accionables con una sola mano.

Para ajustar el ángulo del respaldo, apriete la palanca blanca y mueva el respaldo hacia delante o hacia atrás hasta el ángulo deseado y, a continuación, suelte la palanca (consulte la Figura 9a).

Para ajustar la altura del respaldo, presione la palanca para la altura del respaldo y levante o baje el respaldo hasta la posición deseada. Suelte la palanca y encaje el respaldo en su posición (consulte la Figura 9a).

Almohadillas

Las almohadillas del respaldo y asiento se encajan en su posición.

La almohadilla del respaldo lleva una etiqueta de Rifton (consulte la Figura 9b) y se fija en unos pernos (A) situados detrás del borde superior e inferior del respaldo (consulte la Figura 9c).

La almohadilla del asiento no tiene etiqueta y se fija en unos pernos (B) situados debajo del borde delantero y posterior del asiento (consulte la Figura 9c).



Figura 9a



Figura 9b

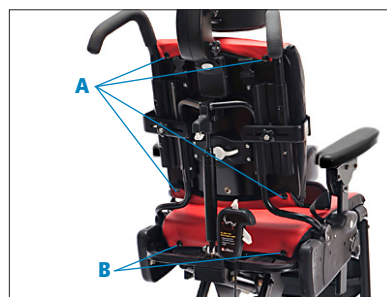


Figura 9c

Cinturón



ADVERTENCIA

Para prevenir caídas, asfixia,

atrapamiento de la cabeza u otras lesiones, utilice siempre el cinturón de seguridad o el arnés pélvico cuando tenga puestas la mesa, las correas torácicas, el cinturón de muslo, el minisoporte de tronco o el arnés mariposa.

Para atar el cinturón de seguridad (consulte la Figura 10a), utilice un bolígrafo para apretar el pequeño botón blanco (C), que está justo debajo de una de las ranuras (B) a los lados del asiento. Mientras se mantiene el botón apretado, inserte el clip metálico en forma de L (A) en la correa del cinturón de seguridad dentro de la ranura con la parte posterior del clip en L hacia la parte delantera del asiento. Presione el clip firmemente en la ranura y suelte el botón, asegurándose de que el clip haya quedado fijo y no se salga al tirar de él. Repita la misma operación en el otro lado del asiento.

Para quitar el cinturón, utilice un bolígrafo para presionar el pequeño botón blanco (C) que está justo debajo de la ranura del clip a los lados del asiento y tire del cinturón hasta soltar el clip. Repita la misma operación en el otro lado del asiento.

Consejo: El cinturón de seguridad se puede insertar en cualquiera de las ranuras pequeñas a ambos lados de la silla (B).



Figura 10a

Reposabrazos

Con la silla se suministra un par de reposabrazos o de apoyos para los antebrazos.

Inserte los reposabrazos en las ranuras grandes a cada lado del asiento.

Los dos tipos de reposabrazos se pueden sacar para transferencias laterales.

Para insertar el reposabrazos y ajustar la altura, apriete el botón blanco (A) justo debajo de la ranura del reposabrazos a los lados del asiento. Inserte el reposabrazos, súbalo o bájele a la altura deseada, suelte el botón y asegúrese de que encaje de forma audible (consulte la Figura 11a).

Para sacar el reposabrazos, apriete el botón blanco debajo de la ranura del reposabrazos a los lados del asiento y tire del reposabrazos hacia arriba.

El reposabrazos se puede regular con múltiples ángulos.

Consejo: El lado recortado del reposabrazos debe mirar hacia el respaldo de la silla.

Para regular el ángulo del reposabrazos, levante la pestaña blanca (B) bajo el borde exterior del reposabrazos (consulte la Figura 11a) y gire el reposabrazos hasta el ángulo deseado. Suelte la pestaña y compruebe el encaje del reposabrazos de forma audible.



Figura 11a (reposabrazos)

Reposabrazos (cont.)

Los apoyos para antebrazos se utilizan para facilitar el control de tronco y cabeza cuando se está sentado.

Los apoyos para antebrazos se unen con un sistema de abrazadera y poste (consulte la Figura 12b). La abrazadera se conecta con un pomo (F) a cualquier posición en la barra, y se puede fijar en el interior o el exterior de la barra (G) (consulte la Figura 12a).

El poste se inserta en la abrazadera y ofrece ajuste de altura y rotación.

El apoyo para brazos se puede unir al poste con diversas inclinaciones deslizando o girándolo hasta alcanzar la posición óptima para el usuario. Afloje el pomo (A) para hacer ajustes (consulte la Figura 12b).

Ajuste los apoyos para antebrazos en la mejor posición para facilitar la comodidad y función del usuario. Deslice o gire el mango (consulte la Figura 12b), aflojando y después apretando el pomo (C). Ajuste las correas (D y E) (consulte la Figura 12a) y sujételas con cinta velcro (la parte áspera del velcro alejada del brazo del usuario).



Figura 12a (Apoyos para antebrazos)

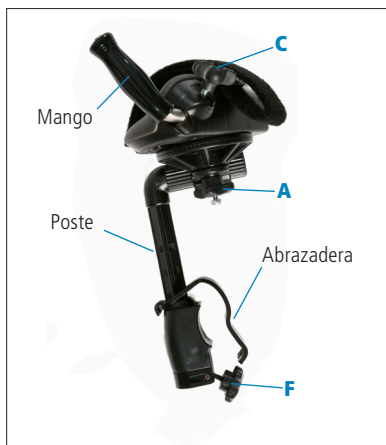


Figura 12b

Profundidad de asiento

Para ajustar la profundidad de asiento, tire de la manija blanca situada debajo del asiento (consulte la Figura 13a). Mueva el asiento hacia delante o hacia atrás hasta la posición deseada y suelte la manija. Asegúrese de que el asiento encaja de forma audible.



Figura 13a

Inclinación

⚠ ADVERTENCIA Para evitar pellizcos o aplastamientos, mantenga las manos y las extremidades inferiores alejadas de las piezas móviles durante el ajuste de la silla.

La inclinación permite situar todo el asiento y el respaldo en cualquier ángulo entre -15° y $+15^\circ$. (El ángulo se ve afectado por el resorte dinámico, consulte las páginas siguientes). Esto posibilita al usuario estar sentado en posición activa o relajada.

Para ajustar el ángulo de inclinación, agarre con una mano el manillar de empuje o la parte superior del respaldo y con la otra accione la palanca de inclinación y el cierre de seguridad (consulte la Figura 13b). Empuje hacia delante o tire hacia atrás del manillar de empuje hasta lograr el ángulo deseado y, a continuación, suelte las palancas para bloquear el asiento y el respaldo en la posición deseada.

Utilice el indicador de ángulo (consulte la Figura 13c) en el lado de la silla para lograr un posicionamiento uniforme.



Figura 13b



Figura 13c

Respaldo y asiento dinámicos

La opción de resorte dinámico está diseñada para permitir que con el movimiento iniciado por el usuario la silla "rebote". La característica de resorte se puede bloquear para proporcionar dos rangos de ajuste: modo de inclinación hacia delante o activo y modo de reclinación o relajado.

El respaldo dinámico es una opción en todas las sillas. Está controlado por el cilindro detrás del respaldo (consulte las Figuras 14a y 14b).

El asiento dinámico es una opción solo en bases estándar. Está controlado por el cilindro bajo el asiento (consulte las Figuras 14a y 14c).



Figura 14a



Figura 14b Respaldo dinámico



Figura 14c Asiento dinámico

Respaldo dinámico

El respaldo dinámico (si está instalado) se controla mediante un cilindro dinámico detrás del respaldo (consulte la Figura 15a).

El respaldo dinámico tiene tres funciones (consulte las Figuras 15b y 15c):

1. **Resorte dinámico desbloqueado.** Gire el collarín blanco de bloqueo por torsión hacia la derecha para un movimiento dinámico de 10° . Con la palanca de ajuste del ángulo del respaldo ajuste el rango dinámico entre -20° y $+5^{\circ}$.
2. **Resorte bloqueado - ajuste hacia delante.** Con el respaldo inclinado hacia delante, gire el collarín blanco de bloqueo por torsión hacia la izquierda. Con la palanca de ajuste del ángulo ajuste el ángulo del respaldo entre -10° y $+5^{\circ}$.
3. **Resorte bloqueado - ajuste de la reclinación.** Con el resorte desbloqueado, empuje el respaldo hacia la posición de reclinación, lo que resulta más fácil de hacer si el usuario está sentado en la silla. Gire el collarín blanco de bloqueo por torsión hacia la izquierda. Con la palanca de ajuste del ángulo ajuste el ángulo del respaldo entre -20° y $+5^{\circ}$.

Consejo: Al bloquear el resorte, mueva el respaldo hacia delante o hacia atrás para permitir que el collarín blanco de bloqueo por torsión pueda deslizarse fácilmente a su posición.



Figura 15a



Figura 15b



Figura 15c

Asiento dinámico (solo base estándar)

El asiento dinámico (si está instalado) se controla mediante un cilindro dinámico debajo del asiento (consulte la Figura 16a).

El asiento dinámico tiene tres funciones (consulte las Figuras 16b y 16c):

1. **Resorte dinámico desbloqueado.** Gire el collarín de bloqueo por torsión hacia la derecha para permitir un movimiento dinámico de 10°. Con la palanca de ajuste de la inclinación ajuste el rango dinámico entre -15° y + 15°.
2. **Resorte bloqueado - ajuste hacia delante.** Con la silla inclinada hacia delante, gire el collarín blanco de bloqueo por torsión bajo el asiento hacia la izquierda. Con la palanca de ajuste de la inclinación ajuste el ángulo del asiento entre -5° y +15°.
3. **Resorte bloqueado - ajuste de la reclinación.** Con el resorte desbloqueado, incline el asiento hacia la posición de reclinación total. Lo que resulta más fácil de hacer si el usuario está sentado en la silla. Gire el collarín blanco de bloqueo por torsión hacia la izquierda. Con la palanca de ajuste de la inclinación sitúe la inclinación entre -15° y + 5°.

Consejo: Al bloquear el resorte, mueva el respaldo hacia delante o hacia atrás para permitir que el collarín blanco de bloqueo por torsión pueda deslizarse fácilmente a su posición.



Figura 16a



Figura 16b



Figura 16c

Asiento de conexión rápida

La unidad de asiento y respaldo de la silla para actividades Rifton puede separarse de su base y unirse de nuevo a cualquier otra base de la silla para actividades Rifton del mismo tamaño. Por lo tanto, una base estándar de la silla para actividades Rifton se puede convertir en una base Hi/Lo y viceversa, encargando la base necesaria.

Desmontaje de asiento y respaldo:

Primero desconecte el ajustador del ángulo del reposapiés, si tiene reposapiés (consulte la Figura 17a). Para ello, por debajo del asiento, presione el pestillo del tubo y tire del reposapiés hacia arriba separándolo del asiento hasta que el tubo salga de su anclaje (consulte la Figura 17a). Bloquee las ruedas giratorias, si tiene, y retire los reposabrazos.

Encuentre dos palancas blancas (A y B) situadas debajo del asiento de la silla (consulte la Figura 17b). Coloque una mano debajo del borde delantero del asiento y levántelo. Al mismo tiempo, con la otra mano, tire de la palanca (A) hacia la parte delantera de la silla. Manteniendo levantado el borde delantero del asiento, tire de la segunda palanca (B) hacia la parte delantera de la silla para desenganchar el asiento de la barra transversal (C).

Una vez desenganchada la parte delantera del asiento (consulte la figura 17c), tire de todo el asiento y del respaldo hacia la parte delantera de la silla hasta que el aro del asiento (D) se desacople de las clavijas metálicas (E).

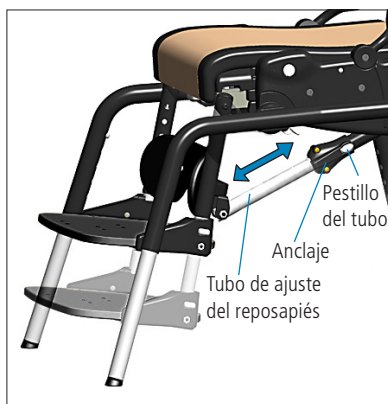


Figura 17a

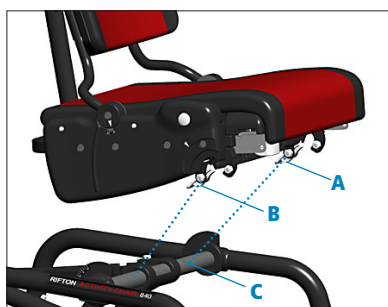


Figura 17b

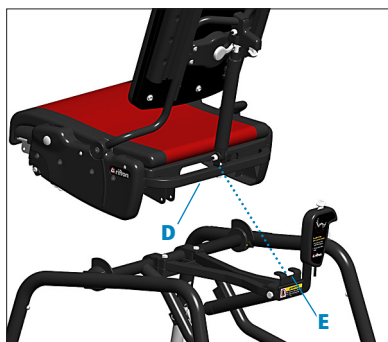


Figura 17c

Montaje de asiento y respaldo

⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir caídas y lesiones, asegúrese de que el asiento esté bien unido por la parte delantera y la trasera antes de su uso.

Si el asiento está instalado en una base Hi/Lo, primero eleve la base hasta su altura máxima.

Para unirlos, deslice el aro del asiento (D) bajo las clavijas (E) en la base, centrando la columna del respaldo entre las clavijas (consulte la Figura 18a). A continuación, deslice el asiento en la barra transversal (C) (consulte la Figura 18b), empujando firmemente hacia abajo en el borde delantero hasta que encaje en su lugar.

Conecte de nuevo los tubos de ajuste del reposapiés en su anclaje manteniendo el anclaje y los tubos en línea recta entre sí. Presione el pestillo del tubo, inserte el tubo en el anclaje y asegúrese de que encaje de forma audible en el ajuste deseado (consulte la Figura 18c).

Consejo: Lo mejor para desmontar el asiento de la base y montarlo de nuevo en otra base es hacerlo en entre dos personas, una a cada lado de la silla.

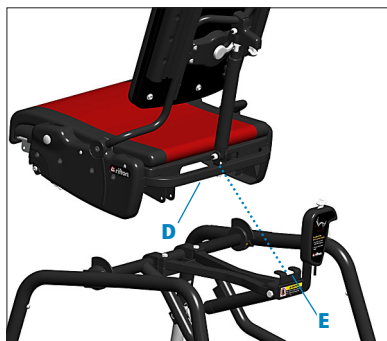


Figura 18a

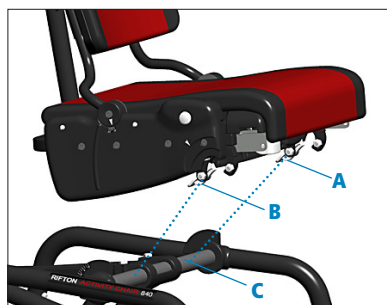


Figura 18b

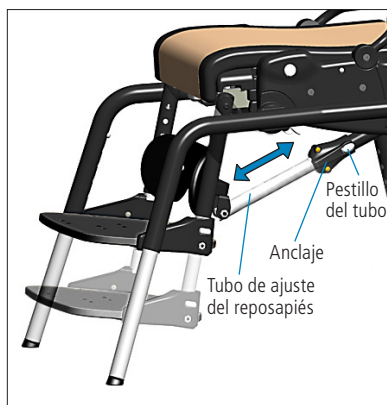


Figura 18c

Base estándar

Patas regulables

⚠ ADVERTENCIA Para evitar caídas y lesiones:

- Ajuste todas las patas de la silla a una misma longitud.
- Utilice siempre las cuatro patas de un conjunto de silla; no ajuste patas de diferentes longitudes o de distintas características a la misma silla.

⚠ PRECAUCIÓN Para permitir la conducción

y evitar lesiones, asegúrese de que las ruedas giratorias con su función de bloqueo de dirección se insertan en la pata trasera derecha del chasis de la base (consulte la Figura 19b).

Consulte más información sobre la función de las ruedas giratorias en la página 21.

Con la compra de la base estándar ya se suministra un conjunto de cuatro patas largas, o cuatro patas cortas, o cuatro patas largas con ruedas giratorias, o cuatro patas cortas con ruedas giratorias. Los conjuntos adicionales de patas se pueden comprar como accesorio.

Para conectar la pata a la silla, apriete el botón a presión e inserte la pata en el anclaje. Suelte el botón a presión y compruebe que la pata encaja en su lugar con un clic (consulte la Figura 19a). Para desconectar la pata de la silla, accione el botón a presión y tire de la pata hacia afuera del anclaje.

Altura del asiento

La elección de patas largas o cortas, con o sin ruedas giratorias influirá en la altura del asiento. Para ajustar la altura del asiento, pulse el botón a presión de cada pata regulable, empuje o tire de la pata hasta el ajuste deseado, suelte el botón a presión el botón a presión y asegúrese de que encaje de forma audible (consulte la Figura 19a).

Reposapiés

El reposapiés es un accesorio para la base estándar. Consulte en la página 22 la información sobre el reposapiés y sus ajustes.

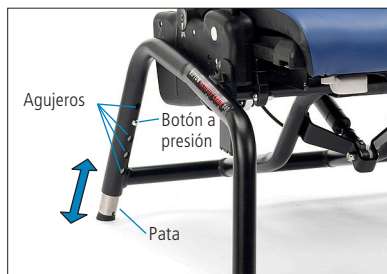


Figura 19a



Figura 19b

Base Hi/lo

⚠ ADVERTENCIA Para evitar pellizcos o

aplastamientos, mantenga las manos y las extremidades inferiores alejadas de las piezas móviles durante el ajuste de la silla.

Altura del asiento de la silla grande y mediana (R850 y R870)

Para ajustar la altura del asiento, utilice el pedal situado en la parte trasera de la silla. Para levantar el asiento, presione repetidas veces el pedal hasta lograr la altura deseada. Para bajar el asiento, levante el cierre de seguridad rojo y el pedal hasta que el asiento descienda a la altura deseada (consulte la Figura 20a).

Altura del asiento de la silla pequeña (R830)

Para ajustar la altura del asiento, utilice el mango en la parte trasera del respaldo. Apriete y mantenga ambos pulsadores apretados mientras se tira hacia arriba o se empuja hacia abajo (consulte la Figura 20b).



Figura 20a



Figura 20b

Frenos de las ruedas giratorias

⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir caídas y

lesiones, accione los frenos de las ruedas giratorias antes de colocar a los usuarios en la silla o retirarlos de ella.

Para fijar el freno, pise el pedal (A) que sobresale de la rueda giratoria (consulte la Figura 21a). Para soltar el freno, levante el pedal.

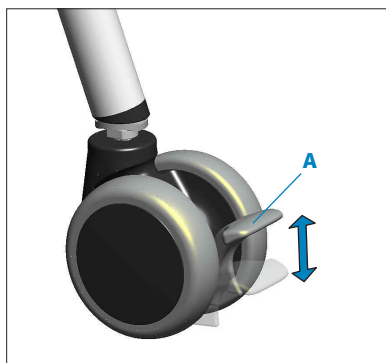


Figura 21a

Bloqueo de dirección

El bloqueo de dirección se puede usar para mantener la dirección y evitar que la silla se vaya hacia los lados al empujarla.

Para aplicar el bloqueo de dirección, coloque la rueda giratoria directamente debajo del poste del bloqueo de dirección y empuje la empuñadura hacia abajo con el pie. El poste de bloqueo de dirección caerá en la ranura de la rueda giratoria y se detendrá justo por encima del pedal de freno (consulte la Figura 21b).

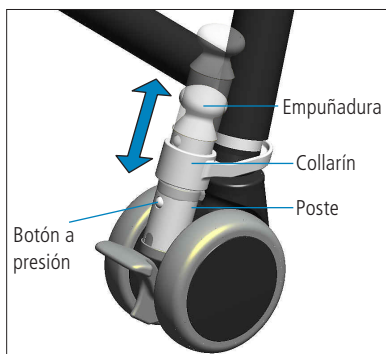


Figura 21b

Para desactivar el bloqueo de dirección, tire hacia arriba de la pieza blanca hasta que el botón a presión encaje de forma audible por encima del collarín metálico.

Reposapiés

⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir caídas y

lesiones, asegúrese de que los botones a presión del reposapiés estén encajados en su lugar antes de permitir que el usuario pise el reposapiés.

El reposapiés es un apoyo para los pies del usuario, cuando el asiento es demasiado alto y los pies no llegan al suelo. También sirve como base de las correas de tobillos, las sandalias y las cuñas. El reposapiés soporta el peso del usuario durante las transferencias, o puede plegarse debajo del asiento.

Para ajustar el ángulo del reposapiés (consulte la Figura 22a), presione el pestillo del tubo blanco bajo el asiento en el ajustador del ángulo del reposapiés. Con la otra mano empuje o tire del reposapiés hasta el ajuste deseado, luego suelte el pestillo y asegúrese de que encaja de forma audible (consulte la Figura 22b).

Para ajustar la altura del reposapiés, pulse simultáneamente los botones blancos situados a ambos lados del reposapiés. Deslice el reposapiés hacia arriba o hacia abajo de manera uniforme a ambos lados hasta lograr la posición deseada. Asegúrese de que el reposapiés encaja en su posición de forma audible (consulte la Figura 22c).



Figura 22a

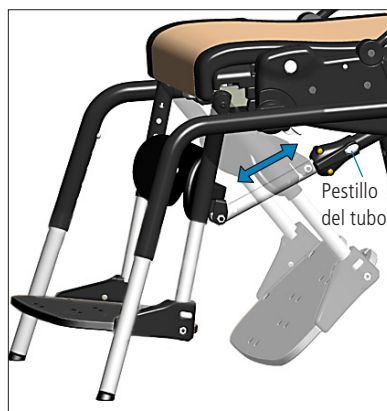


Figura 22b



Figura 22c

Accesorios

Reposacabezas

Se pueden comprar reposacabezas planos, curvos o con alas ajustables (consulte la Figura 23a).

El reposacabezas con alas ajustables permite ajustar cada ala de forma independiente desde una posición casi plana a una perpendicular, ofreciendo más posibilidades de profundidad y anchura.

Para fijar y ajustar la altura del reposacabezas, pulse el botón blanco (A), inserte la barra metálica del reposacabezas y suba o baje hasta la posición deseada. Suelte el botón y asegúrese de que el reposacabezas se bloquea en su sitio de forma audible (consulte la Figura 23b).

Para ajustar la profundidad y el ángulo del reposacabezas, afloje las dos perillas negras (consulte la Figura 23b). Mueva el reposacabezas hasta la posición deseada y apriete firmemente las dos perillas.



Figura 23a



Figura 23b

Adaptador Whitmyer

⚠ ADVERTENCIA El montaje y mantenimiento de este producto debe hacerlo siempre un adulto responsable.

El reposacabezas Whitmyer se puede instalar en todas las sillas para actividades Rifton. El adaptador de Rifton le ofrece la opción de usar el soporte de montaje del reposacabezas Whitmyer M2100 y el sistema de soporte del reposacabezas Whitmyer Onyx (consulte la Figura 24c).

Montaje

1. Para adaptar el sistema de soporte del reposacabezas Whitmyer Onyx, compre el soporte de montaje Whitmyer M2100 a un proveedor autorizado de Whitmyer (consulte la Figura 24a).
2. Con un destornillador y la punta T20 suministrados retire los cuatro tornillos que sujetan el soporte del reposacabezas Rifton. Saque el soporte del respaldo.
3. Use los mismos 4 tornillos para fijar el adaptador (A) al respaldo. No apriete los tornillos en exceso (consulte la Figura 24b).

Fije firmemente el soporte de montaje Whitmyer M2100 al adaptador con dos tornillos de cabeza Whitmyer de $\frac{1}{4}$ " (0,6 cm) que acompañan al soporte de montaje Whitmyer. Para estos tornillos es necesaria una llave Allen de $\frac{3}{16}$ " (0,48 cm) (consulte la Figura 24a).

AVISO El cliente asume toda la responsabilidad de que esta modificación se ha completado correctamente y con seguridad. Rifton no recomienda ni garantiza que el reposacabezas Whitmyer satisfaga las necesidades del cliente. Rifton no es responsable de la instalación ni del uso seguro de los productos Whitmyer.



Figura 24a



Figura 24b



Figura 24c

Soportes laterales

Los soportes laterales proporcionan al usuario un soporte lateral cómodo y son totalmente regulables en altura, anchura y ángulo. Se pueden adquirir con o sin correa torácica.

Para fijar y/o ajustar el soporte lateral (A), afloje el pomo giratorio negro (B) e introduzca la pieza de ajuste (C) en la parte prominente (D) detrás del respaldo (consulte la Figura 25a). Para adaptar los soportes laterales al usuario, ajuste la altura, el ángulo y la anchura de los soportes deslizándolos hacia arriba y hacia abajo del soporte deslizante de la parte prominente (E) y girando el soporte alrededor del pomo. Una vez logrado el ajuste deseado, apriete firmemente los pomos (consulte la Figura 25b).



Figura 25a (Vista superior de la silla)

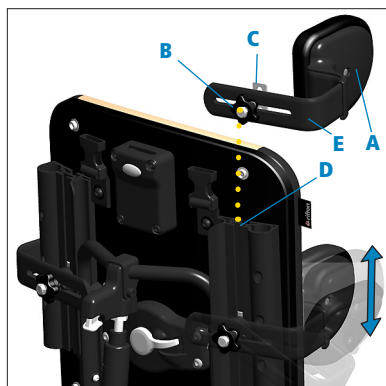


Figura 25b

Correa torácica

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar caídas, asfixia, atrapamiento de la cabeza u otras lesiones:

- Utilice siempre el cinturón de seguridad o el arnés pélvico cuando tenga puestas la mesa, las correas torácicas, el cinturón de muslo, el minisoporte de tronco o el arnés mariposa.
- Asegúrese de que la correa torácica esté bien ajustada y situada cada vez que se usa.

La correa torácica ofrece soporte anterior. Se pueden comprar dos tipos de correas torácicas: uno para uso con soportes laterales y el otro para el uso sin ellos.

La correa torácica independiente se puede utilizar con soportes laterales, pero no estará alineada con los soportes laterales, como sí sucede con la correa torácica compatible.

Para sujetar la correa torácica a los soportes laterales, enhebre el ojal en cualquiera de los extremos de la correa torácica por encima del conjunto de pomo y pieza de ajuste de los soportes laterales (consulte la Figura 26a), asegurándose de que la hebilla quede hacia el exterior.

Los ojales se pueden enhebrar con la correa torácica que abarca los soportes laterales o bien con las correas de la parte interior de los soportes laterales (consulte la Figura 26a).

La correa torácica independiente es más ancha que la correa torácica para usarse con soportes laterales (consulte la Figura 26b).

Para sujetarla, afloje los pomos giratorios negros en ambos extremos de la correa e introduzca las piezas de ajuste en la parte prominente detrás del respaldo. Deslice los pomos giratorios hacia arriba y hacia abajo hasta alcanzar la altura deseada y, a continuación, apriete firmemente los pomos (consulte la Figura 26c).



Figura 26a



Figura 26b



Figura 26c

Arnés mariposa

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar caídas, asfixia, atrapamiento de la cabeza u otras lesiones:

- Utilice siempre el cinturón de seguridad o el arnés pélvico cuando tenga puestas la mesa, las correas torácicas, el cinturón de muslo, el minisopORTE de tronco o el arnés mariposa.
- Asegúrese de que el arnés mariposa esté bien ajustado y situado cada vez que se use.
- Utilice siempre soportes laterales junto con el arnés mariposa, si resulta necesario asegurarse de que los usuarios no se caigan hacia los lados.

El arnés mariposa proporciona apoyo anterior al tiempo que permite la máxima libertad de movimientos.

Con la parte trasera de la pieza en L mirando hacia la parte delantera del asiento, coloque el arnés mariposa insertando el clip metálico (A) en forma de L de los extremos de las correas inferiores del arnés en las ranuras (B) a ambos lados del asiento. Use un bolígrafo para insertar los clips, como se muestra en la página 10. Presione firmemente en la ranura para asegurarse de que los clips no se salen al tirar (consulte la Figura 27a). A continuación, ajuste las hebillas de la parte superior (E) detrás de la parte superior del respaldo (F) (consulte la Figura 27b).

El arnés mariposa se puede insertar en cualquiera de los conjuntos de ranuras pequeñas que hay en los laterales del asiento de la silla. Utilice otro conjunto para el cinturón de seguridad o el arnés pélvico.

Para quitar el arnés mariposa, utilice un bolígrafo para presionar el pequeño botón blanco (C) y tire del arnés hasta desenganchar el clip. Repita la operación en el otro lado del asiento (consulte la Figura 27a).

Para soltar completamente el arnés mariposa, libere las cuatro hebillas (D y E) (consulte las Figuras 27a y 27b). Siente al usuario en la silla para actividades y después coloque el acolchado del arnés en el pecho del usuario. Sujete las cuatro hebillas y ajuste las correas, si es necesario.



Figura 27a



Figura 27b



Arnés mariposa estrecho

El arnés mariposa estrecho se estrecha a la altura del pecho, por lo que resulta más cómodo para las mujeres. Proporciona la misma funcionalidad que el arnés mariposa normal.

Para colocar el arnés mariposa estrecho siga las instrucciones del arnés mariposa normal.

Cinturón de muslo

⚠ ADVERTENCIA Para prevenir caídas, asfixia, atrapamiento de la cabeza u otras lesiones, utilice siempre el cinturón de seguridad o el arnés pélvico cuando tenga puestas la mesa, las correas torácicas, el cinturón de muslo, el minisopORTE de tronco o el arnés mariposa.

Un cinturón de muslo puede proporcionar apoyo y seguridad adicionales a los muslos del usuario y ayuda a la aducción de las rodillas.

Para colocar el cinturón de muslo, desabroche y levante la parte delantera de la almohadilla del asiento. Mantenga el pasador metálico sobre el lado empotrado de la ranura en forma de H con el cinturón extendiéndose sobre el borde más cercano y la hebilla de plástico hacia abajo (consulte la Figura 28a). Con la otra mano, pellizque los lados del cinturón a 1,5 pulgadas (3,8 cm) aproximadamente del pasador metálico. Empuje la parte pellizcada del cinturón a través de la barra transversal de la ranura en forma de H y siga empujando hasta que el cinturón quede plano y después tire hacia arriba. El pasador metálico debe quedar en la parte superior con la lazada del cinturón debajo del asiento. Repita con el otro extremo del cinturón. Coloque de nuevo la almohadilla del asiento.

Para quitar el cinturón de muslo, retire primero la almohadilla del asiento. Agarre la correa del cinturón de muslo directamente por encima de la ranura de la que sobresale, y pellizque los bordes de la correa en la barra transversal de la ranura en H. Empuje hacia abajo la correa para aflojar el pasador metálico en el hueco en el que está asentado. Sujete el pasador metálico con la otra mano y tire de la correa para liberarla. Repita la operación en el otro lado y después coloque de nuevo la almohadilla del asiento.

Para ajustar el cinturón de muslo, tire de las correas de ajuste enhebradas en cada uno de los lados de la hebilla central (consulte la Figura 28b).

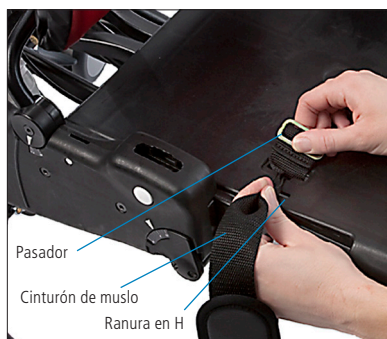


Figura 28a



Figura 28b

Arnés pélvico

⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir caídas, asfixia, atrapamiento de la cabeza u otras lesiones, utilice siempre el cinturón de seguridad o el arnés pélvico cuando tenga puestas la mesa, las correas torácicas, el cinturón de muslo, el minisopORTE de tronco o el arnés mariposa.

El arnés pélvico se puede usar en lugar de un cinturón de seguridad como el principal dispositivo de sujeción del usuario en la silla. Esta alternativa al cinturón de seguridad más habitual proporciona una base estable para el desarrollo del control postural al estar sentado. El arnés pélvico posiciona firmemente la pelvis del usuario, sujetando caderas y muslos sin presionar el abdomen.

Para sujetar el arnés pélvico, colóquelo en el asiento con los extremos anchos hacia el respaldo y los puntos de sujeción de la correa hacia abajo. Inserte los clips metálicos en forma de L, sujetos con correas cortas a las esquinas traseras del arnés, en las ranuras a ambos lados del asiento. Use un bolígrafo para insertar los clips, como se muestra en la página 10. Presione el clip firmemente dentro de la ranura con la parte posterior de la L hacia la parte delantera del asiento, comprobando que encaja de forma audible y que se mantiene en su lugar al tirar (consulte la Figura 29a).

Coloque la almohadilla plana del arnés en el asiento tal como se muestra (consulte la Figura 29b). Siente al usuario en la silla. Tire de cada extremo de la almohadilla pasándolo entre las piernas y sobre la pierna más próxima (por ejemplo, el extremo de la almohadilla de la izquierda sobre la pierna izquierda) (consulte la Figura 29c). Sujete las hebillas. Apriete las correas, si es necesario.

Para quitar el arnés pélvico, utilice un bolígrafo para presionar el pequeño botón blanco que está justo debajo de la ranura del clip a los lados del asiento y tire del arnés hasta soltar el clip. Repita la misma operación en el otro lado del asiento.

El arnés pélvico se puede insertar en cualquiera de las ranuras pequeñas a ambos lados de la silla. Asegúrese de ajustar la profundidad del asiento necesaria para el usuario y verifique que la ranura seleccionada para la sujeción permite el uso adecuado del arnés pélvico.



Figura 29a



Figura 29b



Figura 29c

Guías de cadera

Las guías de cadera ofrecen apoyo lateral adicional a las caderas del usuario y se pueden ajustar de forma independiente para adaptarlas mejor.

Las guías de cadera se anclan a los soportes para brazos, ya sean reposabrazos o apoyos para antebrazos, y se pueden quitar junto con los soportes para brazos en los traslados.

Para colocar la guía de la cadera izquierda: Retire el soporte del brazo izquierdo. Coloque la guía de la cadera izquierda sobre la ranura del soporte del brazo con el botón blanco para ajustes laterales en la parte exterior de la silla mirando hacia el respaldo (consulte la Figura 30a). Deslice el soporte del brazo a través de la guía de cadera y en la ranura de la silla.

Consejo: Haga coincidir el perfil moldeado saliente del reposabrazos en la guía de cadera con la forma del reposabrazos (consulte la Figura 30b).

Repita en sentido inverso para fijar la guía de la cadera derecha.

Para ajustar el ancho entre las guías de la cadera izquierda y derecha, presione el botón blanco y mueva la almohadilla de la guía de cadera hacia dentro y hacia afuera, comprobando que encaje en su sitio de forma audible, una vez logrado el ajuste deseado.

Consejo: Se pueden usar guías de cadera pequeñas con el minikit.



Figura 30a



Figura 30b

Abductor

El abductor mantiene separadas cómodamente las rodillas del usuario.

Antes de colocar el abductor, retire los apoyos para piernas, si los hubiere.

Para sujetar el abductor, inserte el poste del abductor en la ranura centrada directamente bajo la parte delantera del asiento. Debajo de la ranura apriete el botón blanco del abductor para introducir el poste del abductor en la ranura (consulte la Figura 31a).

Para ajustar la profundidad del abductor respecto al asiento, pulse el botón blanco del abductor y tire del abductor hasta el ajuste deseado y después suelte el botón asegurándose de que el abductor encaja en su sitio de forma audible.

Aductores

Los aductores limitan el movimiento lateral de las rodillas del usuario y proporcionan una limitación lateral cómoda.

Para colocar los aductores, apriete el botón blanco del aductor e introduzcan los postes metálicos en las ranuras situadas en las esquinas delanteras de los laterales del asiento, con el acolchado del aductor hacia el asiento. Suelte el botón y compruebe que los aductores encajan en su sitio.

Para quitar los aductores, apriete los botones blancos del aductor situados debajo de las esquinas delanteras del asiento y tire de los aductores hacia afuera (consulte la Figura 31b).



Figura 31a



Figura 31b

Apoyo para piernas

El apoyo para piernas se puede utilizar en lugar de un abductor proporcionando tanto abducción como aducción.

Antes de fijar el apoyo para piernas, retire el abductor, si está colocado.

Para colocar el apoyo para piernas, introduzca el poste del apoyo para piernas (A) en la ranura (B) centrada bajo la parte delantera del asiento. Para introducir el apoyo para piernas, apriete debajo de la ranura el botón del apoyo para piernas (C) (consulte la Figura 32a).

Para ajustar la profundidad del apoyo para piernas respecto al asiento, apriete el botón del apoyo para piernas (C). Tire o empuje el apoyo para piernas hasta conseguir la posición deseada. Suelte el botón y asegúrese de que el apoyo para piernas encaje en su sitio de forma audible.

Para ajustar el ancho del apoyo para piernas, pulse los botones blancos (D) situados en el anclaje de plástico detrás de las correas de los apoyos para piernas. Para juntar o separar los apoyos para piernas, suelte los botones una vez lograda la posición deseada, comprobando que el apoyo encaja en su sitio de forma audible (consulte la Figura 32a).

Sujete las piernas del usuario en su sitio con las correas de los apoyos para piernas (consulte la Figura 32b).

Correas de tobillo

Las correas de tobillo sujetan de forma segura los pies del usuario ofreciendo unas posibilidades limitadas de movimiento (consulte la Figura 32c).

Para colocar las correas de tobillo, inserte los extremos de las correas en las ranuras en T en la parte posterior del reposapiés. Tire de las correas de tobillo firmemente hasta sujetar los clips debajo de las ranuras en T (consulte la Figura 32d). Ajuste las correas para adaptarlas a las necesidades del usuario.

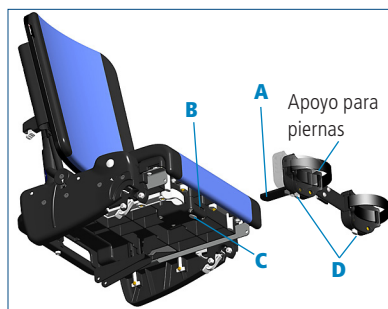


Figura 32a



Figura 32b



Figura 32c



Figura 32d

Sandalias y cuñas

Las sandalias proporcionan un posicionamiento efectivo de los pies del usuario y precisan el reposapiés. La adición de cuñas debajo de las sandalias permite personalizar la altura y la inclinación de las sandalias. Las bases de las sandalias son un par para pie izquierdo y pie derecho.

Para sujetarlas, coloque la base de la sandalia en el reposapiés sobre uno de los pares de tuercas incrustadas en el reposapiés. Use los pomos negros para fijar la base de sandalia al reposapiés. Comience apretando los pomos solo a la mitad, deslice la base de la sandalia hasta la posición deseada y apriete firmemente los pomos (consulte la Figura 33a).

Asegure cada sandalia en su base con la palanca blanca (consulte la Figura 33c).

Para incorporar una cuña, tire hacia atrás de la palanca blanca en el lado de la sandalia, para sacarla de su base. Coloque la cuña en la base de la sandalia y empuje hacia atrás la palanca inferior, bloqueando la cuña en la base. Añada cuantas cuñas sean necesarias. Coloque la sandalia en la parte superior de la pila y bloquéela empujando la correspondiente palanca blanca (consulte la Figuras 33b y 33c). Compruebe que las sandalias y las cuñas estén firmemente unidas antes de su uso.

Las cuñas se pueden utilizar de cualquier manera cuando se apilan.

Sujete los pies del usuario con las correas de las sandalias.

Consejo: Las sandalias no se pueden utilizar al mismo tiempo que las correas de tobillo.



Figura 33a

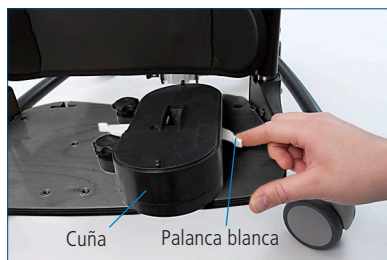


Figura 33b



Figura 33c

Kit de soporte lumbar y de asiento

El kit de soporte lumbar y de asiento se puede recortar de forma personalizada y adecuar para ofrecer apoyo postural adicional.

El soporte lumbar se sujeta detrás de la almohadilla de respaldo para ofrecer apoyo adicional a la región lumbar. El soporte de asiento se ajusta debajo de la almohadilla del asiento para ayudar a prevenir que el usuario se deslice hacia delante en el asiento (consulte la Figura 34a).

Para sujetar el soporte lumbar y de asiento personalizado, retire las almohadillas de asiento y respaldo y, a continuación, siga las instrucciones de instalación adjuntas al kit de soporte lumbar y de asiento. El acolchado se puede cortar o recortar, si es necesario, y fijarlo al asiento con cintas velcro. Una vez haya finalizado, coloque de nuevo las almohadillas de asiento y respaldo.

Almohadilla de relleno del respaldo

La almohadilla de relleno del respaldo ofrece apoyo adicional a la región lumbar, cuando el respaldo de la silla es alto, creando un espacio entre respaldo y asiento (consulte la Figura 34b).

Para colocar la almohadilla de relleno del respaldo, encájela en el enganche centrado en el borde inferior trasero del respaldo (consulte la Figura 34c).



Figura 34a



Figura 34b

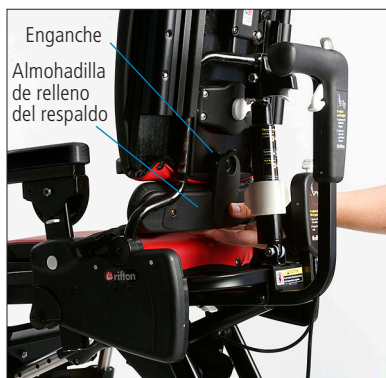


Figura 34c

Mesa

⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir caídas, asfixia, atrapamiento de la cabeza u otras lesiones, utilice siempre el cinturón de seguridad o el arnés pélvico cuando tenga puestas la mesa, las correas torácicas, el cinturón de muslo, el minisoporte de tronco o el arnés mariposa.

La mesa ofrece una superficie para trabajar, jugar y comer y se puede ajustar en altura, ángulo y profundidad. Presenta un borde suavemente redondeado para contener los derrames. La mesa se puede fijar a los reposabrazos de madera, pero no a los apoyos para antebrazos.

Para colocar la mesa, primero ajuste ambos reposabrazos a la misma altura y con el mismo ángulo. Tire de la manija negra de la mesa y deslícela hacia los reposabrazos (consulte la Figura 35a).

Para ajustar la profundidad de la mesa, tire de la manija negra y deslice la mesa hacia delante o hacia atrás. Una vez en el lugar deseado, suelte la manija y asegúrese de que la mesa encaje en su sitio de forma audible.

Ajuste la altura y el ángulo de la mesa ajustando la altura y el ángulo del reposabrazos con la mesa conectada (consulte la página 11).

Asidero

El asidero se puede colocar en cualquier lugar del borde de la mesa para ofrecer soporte y seguridad adicionales.

Para fijar y ajustar el asidero, afloje el pomo grande ovalado y deslice el asidero a lo largo de la bandeja hasta lograr la posición deseada; finalmente apriete el pomo firmemente (consulte la Figura 35b).



Figura 35a

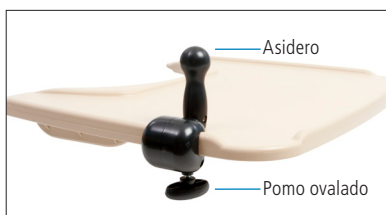


Figura 35b

Manillares de empuje

Los manillares de empuje ofrecen al cuidador una forma ergonómica de maniobrar la silla y transportar al usuario.

Hay un manillar de empuje izquierdo y otro derecho.

Para colocar el manillar de empuje, presione el botón a presión de la parte inferior del manillar e insértelo en una de las protuberancias en la parte trasera del respaldo. Dado que existe un manillar de empuje izquierdo y otro derecho, cada uno solo encaja en un lado de la silla (consulte la Figura 36a).

Para ajustar la altura del manillar de empuje, presione el botón a presión y mueva el manillar hacia arriba y hacia abajo hasta lograr la altura deseada. Suelte el botón, asegurándose de que el manillar de empuje encaje en su sitio de forma audible.

Elevador de reposapiés

Los elevadores de reposapiés en las sillas de tamaño grande y mediano suponen 4" (10 cm) más de elevación para el reposapiés.

Con todos los elevadores de reposapiés se pueden utilizar sandalias y correas de tobillo. Sujete con los mandos suministrados el elevador al reposapiés (consulte la Figura 36b).

Consulte en las páginas 32 y 33 las instrucciones para incorporar correas de tobillo, sandalias y cuñas.



Figura 36a



Figura 36b Elevador de reposapiés

Minikit (solo R820 y R830)

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar caídas, asfixia, atrapamiento de la cabeza u otras lesiones:

- Utilice siempre el cinturón de seguridad o el arnés pélvico cuando tenga puestas la mesa, las correas torácicas, el cinturón de muslo, el minisoporte de tronco o el arnés mariposa.
- Verifique el correcto ajuste y posicionamiento del minisoporte de tronco con cada uso.

Los tres elementos del minikit convierten a la silla para actividades pequeña en la primera opción para los niños más pequeños, desde aprox. 8 meses hasta 2 años (consulte la Figura 37a). Retírelo a medida que el niño crece para seguir usando la misma silla durante muchos años más.

El minielevador de reposapiés añade 3" (8 cm) de altura al reposapiés.

El minisoporte de tronco proporciona soporte lateral y anterior al usuario y se puede ajustar su altura y anchura (consulte la Figura 37b). Para colocarlo afloje los mandos (A) e inserte las piezas de ajuste (B) en las partes prominentes (C) detrás del respaldo. Deslice los pomos hacia arriba y hacia abajo hasta que el soporte de tronco esté a la altura deseada. Apriete firmemente los pomos.

La minipieza de inserción del respaldo reduce la profundidad del asiento en 1" (3 cm). Para instalar la minipieza de inserción del respaldo, desabroche el borde superior de la almohadilla del respaldo, deslice dentro la pieza de inserción y abroche de nuevo la almohadilla (consulte la Figura 37c).



Figura 37a



Figura 37b Minisoporte de tronco



Figura 37c Minipieza de inserción del respaldo

Mantenimiento

Este producto está diseñado y probado para una vida útil de 5 años si se utiliza y mantiene de acuerdo con este manual. Los usuarios deben, en todo momento, asegurarse de que el producto permanece en condiciones seguras y utilizables, lo que incluye el mantenimiento y las inspecciones regulares que se especifican en este manual.

Para prevenir fallos estructurales que pueden provocar lesiones graves o muerte:

- Compruebe de forma periódica en este producto y sus accesorios el aflojamiento o la ausencia de tornillos, la fatiga del metal, grietas, soldaduras rotas, piezas que faltan, la inestabilidad general u otros signos de desgaste excesivo.
- Retire inmediatamente este producto si observa cualquier condición que pudiera causar un funcionamiento inseguro.
- No use los componentes o productos Rifton para ningún otro fin distinto al previsto.
- Sustituya o repare los componentes o los productos que estén dañados o que parezcan inestables.
- Utilice solo repuestos autorizados de Rifton. La información sobre pedidos de piezas de recambio figura en la contraportada de este manual del producto.

Limpieza

Después de cada uso, limpie con toallitas desinfectantes o una solución con un 10 % de lejía como máximo.

La tapicería se debe limpiar de la misma manera. También se puede usar un producto de limpieza comercial adecuado para la piel artificial.

Las correas con cierres velcro se pueden lavar. Enganche los cierres antes del lavado. No planchar.

Declaración de garantía

Si un producto Rifton se avería o no funciona durante el primer año, lo reemplazaremos sin cargo.

Materiales

- Los elementos de acero (tuercas, pernos, tornillos, etc.) suelen ser niquelados o de acero inoxidable.
- Los artículos de tapicería (almohadillas, bloques de soporte, apoyos acolchados, etc.) suelen estar hechos de espuma de poliuretano con cubierta ignífuga de poliuretano expandido.
- Los chasis normalmente se componen de tubos de acero o de aluminio, soldados entre sí, y recubiertos por un acabado de pintura al horno. Algunos componentes del chasis también pueden ser de acero inoxidable.
- Las correas están hechas habitualmente de tejido de polipropileno o nailon.
- Los componentes de madera normalmente son de madera contrachapada de abedul, de arce sólido o chapas de madera laminada, con un acabado de barniz de poliuretano transparente.
- Normalmente, los componentes plásticos se moldean por inyección a partir de diversas resinas industriales.

Ningún componente contienen plomo ni látex de goma natural.

Modificaciones del usuario

 ADVERTENCIA Para evitar lesiones graves o la muerte, no modifique ni altere los productos o componentes de Rifton, ni utilice productos o componentes de Rifton combinados con productos de otros fabricantes. Rifton no se hace responsable de las posibles modificaciones o alteraciones realizadas en nuestros componentes o productos después de salir de nuestras instalaciones. Los clientes que modifiquen o alteren nuestros componentes o productos o los utilicen junto con productos de otros fabricantes, lo harán bajo su propia responsabilidad.

Información de contacto de Rifton



Correo electrónico
Sales@Rifton.com



Teléfono
800.571.8198
9-5 EST



Correo postal
Rifton Equipment
PO Box 260
Rifton NY 12471-0260



Fax
800.865.4674



Página web
www.Rifton.com

Para pedir piezas de recambio

1. **Localice el número de serie** del producto en la pequeña etiqueta blanca.
2. Tenga este número a mano cuando llame a su representante del servicio de atención al cliente al **800.571.8198**.

Utilice solo piezas de recambio suministradas por Rifton Equipment.

Nos complace suministrarle piezas de recambio. Aunque Rifton hace todo lo posible para suministrar piezas e instrucciones correctas para la reparación o renovación de su equipo, usted es responsable de garantizar que todas las reparaciones o modificaciones se realicen de forma correcta y segura.



Consulte videos de formación práctica, cartas de necesidad médica y artículos informativos en:
www.rifton.com/activitychair



¿Busca una respuesta rápida?

Consulte nuestra **Guía de referencia rápida** que se encuentra en un bolsillo detrás del cojín trasero de su silla para actividades Rifton.